


Инструкция по применению

1.

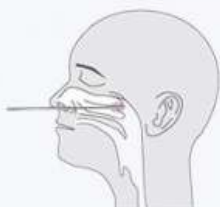


Вставить стерильный тампон в ноздрю до задней поверхности носоглотки

2.



Сделать мазок

3.

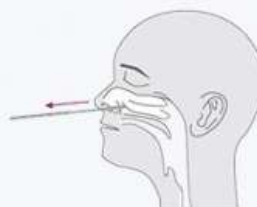

Вынуть стерильный тампон из носовой полости

4.



Вставить тампон в пробирку для экстракции. Сжимая пробирку, прокрутить тампон более 5 раз

5.



Вынуть тампон, сжимая боковые стороны пробирки, чтобы извлечь жидкость

6.



Плотно прижать колпачок к пробирке

7.



Нанести 3 капли извлеченной жидкости на тестовое устройство

8.



Узнать результат тестирования через 15-30 минут